

CONTENIDO DEL SOBRE

CADA SOBRE Y TODO SU CONTENIDO ES EXCLUSIVO PARA UN ÚNICO PACIENTE

- Hoja de instrucciones para la toma de muestra.
- Kit de toma de muestra: torundas de algodón en tubo protector.
- Formulario de solicitud de servicio: ejemplar para el laboratorio en papel amarillo, y ejemplar para el facultativo en papel blanco. Este último deberá ser presentado al paciente para que firme el consentimiento informado para la realización del análisis genético molecular solicitado.

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA

ATENCIÓN: ES NECESARIO EL USO DE GUANTES DURANTE TODO EL PROCESO

1. Abrir el envase de la torunda sin tocar el algodón.
2. Introducir el algodón en la boca y frotar la parte interna del carrillo durante al menos 10 segundos.
3. Tomar al menos DOS muestras de cada individuo, cada una de un carrillo.
4. Guardar la torunda en su tubo protector correctamente identificado.
5. Mantener las muestras, siempre que sea posible, refrigeradas a 4°C (en la nevera) hasta su recogida.
6. Ponerse en contacto con GENYCA INNOVA para la recogida de las muestras, en el teléfono: 91 634 61 06.

DOCUMENTO QUE DEBE SER ENVIADO JUNTO CON LAS MUESTRAS

- Formulario de solicitud de servicio (ÚNICAMENTE EL EJEMPLAR PARA EL LABORATORIO, de color amarillo) debidamente cumplimentado y firmado por el facultativo en los siguientes apartados (señalados en negrita en el formulario):
 - a.- Datos del facultativo
 - b.- Consentimiento informado