

CONTENIDO DEL SOBRE

CADA SOBRE Y TODO SU CONTENIDO ES EXCLUSIVO PARA UN ÚNICO PACIENTE

- Hoja de instrucciones para la toma de muestra.
- Kit de toma de muestra: tubos con EDTA (tapón morado) identificados con una etiqueta con código de barras.
- Formulario de solicitud de servicio: ejemplar para el laboratorio en papel amarillo, y ejemplar para el facultativo en papel blanco. Este último deberá ser presentado al paciente para que firme el consentimiento informado para la realización del análisis genético molecular solicitado.

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA

ATENCIÓN: ES NECESARIO EL USO DE GUANTES DURANTE TODO EL PROCESO

1. Complimentar todos los apartados del formulario de solicitud.
2. Tomar sangre del paciente en los tubos correctamente identificados que el laboratorio le ha proporcionado. No centrifugar, refrigerar o congelar los tubos con la sangre.
3. Introducir los tubos con la muestra en la bolsa plástica que GENYCA INNOVA le ha proporcionado, y comprobar que está correctamente identificada con el código de barras.
4. Introducir la bolsa con los tubos en el sobre de toma de muestra (también identificado mediante código de barras).
5. Mantener el sobre cerrado, a temperatura ambiente hasta su recogida.
6. Ponerse en contacto con GENYCA INNOVA para la recogida de las muestras, en el teléfono: 91 634 61 06.

DOCUMENTO QUE DEBE SER ENVIADO JUNTO CON LAS MUESTRAS

- Formulario de solicitud de servicio (ÚNICAMENTE EL EJEMPLAR PARA EL LABORATORIO, de color amarillo) debidamente cumplimentado y firmado por el facultativo en los siguientes apartados (señalados en negrita en el formulario):
 - a.- Datos del facultativo
 - b.- Consentimiento informado