

## CONTENIDO DEL SOBRE

---

**CADA SOBRE Y TODO SU CONTENIDO ES EXCLUSIVO PARA UN ÚNICO PACIENTE**

- Hoja de instrucciones para la toma de muestra.
- Torundas para la toma de muestra: DOS TORUNDAS POR INDIVIDUO.
- Consentimiento Informado: para emplear en caso de solicitar el estudio con validez judicial (ejemplares para el laboratorio y para el interesado).
- Formulario de solicitud de servicio: ejemplar para el laboratorio en papel amarillo.

## INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA

---

**ATENCIÓN: ES NECESARIO EL USO DE GUANTES DURANTE TODO EL PROCESO**

1. Rotular cada tubo-torunda claramente como "Padre", "Madre", "Hijo-1" o "Hijo-2", según corresponda.
2. Abrir el envase de la torunda sin tocar el algodón.
3. Introducir el algodón en la boca y frotar la parte interna del carrillo durante al menos 10 segundos.
4. Tomas DOS muestras de cada individuo.
5. Guardar la torunda en su tubo protector correctamente identificado.
6. Mantener las muestras, siempre que sea posible, refrigeradas a 4°C (en la nevera) hasta su recogida.
7. Ponerse en contacto con GENYCA INNOVA para la recogida de las muestras, en el teléfono: 91 634 61 06.

## DOCUMENTO QUE DEBE SER ENVIADO JUNTO CON LAS MUESTRAS

---

- Formulario de solicitud de servicio (ejemplar para el laboratorio, de color amarillo) debidamente cumplimentado.
- Consentimiento Informado (ejemplar para el laboratorio), en caso de solicitar el estudio de paternidad biológica con validez judicial, debidamente cumplimentado y firmado por el interesado.

**GENYCA INNOVA Análisis y Diagnóstico Genético S.L.**

www.genyca.es

info@genyca.es

T: +34 91 634 61 06

F: +34 91 639 92 16