

1º. MATERIAL SUMINISTRADO

IMPORTANTE: EL MATERIAL SE SUMINISTRA BAJO PEDIDO.
AVISAR CON ANTELACIÓN PARA PODER RECIBIRLO POR MENSAJERÍA.


Para cada petición, GENYCA proporciona una caja que contiene:

- Instrucciones que está usted leyendo.
- Formulario de solicitud de servicio, que debe rellenar y firmar la paciente.
- Recibo de toma de muestra, que debe rellenar el laboratorio y entregar sellado a la paciente.
- Embalaje fotoprotector que contiene:
 - Tubo especial de 10 ml (Streck, Cell-Free DNA BCT), con agente preservante de ADN libre en plasma, envuelto en papel absorbente y dentro de una bolsa con cierre hermético.
 - Material gel amortiguador de golpes.

2º. TOMA DE MUESTRAS

LA PACIENTE NO NECESITA ESTAR EN AYUNAS.
SE TOMARÁ LA MUESTRA A PARTIR DE LA SEMANA 10 DE GESTACIÓN

1. Tomar 10 ml de sangre de la paciente en el tubo que GENYCA le ha proporcionado, llenándolo al máximo.

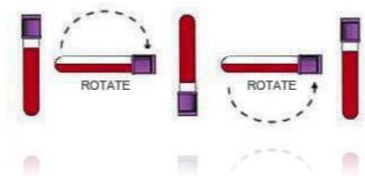

2. Invertir suavemente de 8 a 10 veces el tubo con la sangre y mantener en posición vertical.
3. Ponerse en contacto **inmediatamente** con GENYCA para la recogida de las muestras: **+34 91 634 61 06**.

IMPORTANTE: MANTENER LA MUESTRA **A TEMPERATURA AMBIENTE** HASTA SU RECOGIDA, NO CENTRIFUGAR, REFRIGERAR O CONGELAR EL TUBO CON LA SANGRE.

Precauciones a tener en cuenta para evitar hemólisis de la muestra:

- Evitar mantener el torniquete en el brazo del paciente por largos periodos de tiempo.
- Usar agujas de calibre 20 o superiores (se permiten agujas de calibre 22 de pared fina).
- En caso de usar jeringuilla, evitar excesiva presión en el émbolo.
- No expulsar la sangre en el tubo a través de la aguja.
- No agitar la sangre dentro del tubo para mezclar con anticoagulante (mezclar por inversión suavemente).
- No refrigerar el tubo con la sanqre.

3º. ENVÍO DE MUESTRAS _____

MUY IMPORTANTE: la muestra debe ser recibida en GENYCA en un **plazo máximo de 24 horas** por lo que se deben tomar las siguientes precauciones:

- a. Las extracciones deben hacerse exclusivamente LUNES, MARTES o MIÉRCOLES evitando vísperas de festivos.
- b. Tener en cuenta los días de fiesta, tanto locales, como nacionales.

Enviar a GENYCA la caja en las mismas condiciones que lo ha recibido. No olvide introducir:

- Tubo de sangre envuelto en papel absorbente y dentro de una bolsa con cierre hermético. El tubo deberá estar protegido por el gel antigolpes e introducido en el embalaje fotoprotector. Viajará a temperatura ambiente.
- Formulario de solicitud de servicio, rellenado y firmado por la paciente.
- Documento de datos complementarios (DDC) rellenado y firmado por la paciente.
- Volante médico aportado por la paciente.
- Recibo sellado.