

1º. CONTENIDO DEL KIT

- 1 Formulario de Solicitud de Servicio por paciente
- 2 Escobillones por paciente
- 1 Sobre para envío postal

2º. TOMA DE MUESTRAS

EL PACIENTE NO NECESITA ESTAR EN AYUNAS, PERO SÍ TENER LA BOCA LIMPIA: EVITAR COMER, USAR PINTALABIOS, LAVARSE LOS DIENTES O FUMAR AL MENOS UNA HORA ANTES DE TOMAR LA MUESTRA

1. Se tomarán dos escobillones estériles con células de mucosa bucal (tejido de la parte interna del carrillo) de cada paciente siguiendo las siguientes instrucciones **para cada escobillón**:



- 1.1. Abrir el precinto de seguridad del tubo protector y extraer el escobillón, siempre cogiéndolo por la tapa, **sin tocar el escobillón con los dedos**.



- 1.2. Introducir el escobillón en la boca y frotar vigorosamente la parte interna del carrillo 20 veces, presionando con firmeza.
- 1.3. Repetir este proceso para cada escobillón contenido en el kit de toma de muestras. Usar cada escobillón en partes distintas de la boca.



- 1.4. Guardar en el tubo protector.
- 1.5. Identificar con el nombre completo del paciente.

2. Cumplimentar el FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO. El paciente deberá firmar el Consentimiento Informado de la página 2 del documento.

2º. ENVÍO DE MUESTRAS A GENYCA

1. Introducir en el Sobre de Envío:
 - 1 Formulario de Solicitud de Servicio por paciente
 - 2 Escobillones por paciente
 - Documento de prescripción médica de la prueba. Si tiene alguna duda a este respecto, por favor, contacte con nosotros.
 - Presupuesto firmado.
2. Enviar el sobre por correo certificado para un adecuado cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal.

TENGA EN CUENTA QUE:

- La muestra tomada según este procedimiento es estable durante días y será transportada a temperatura ambiente.
- Una vez lleguen las muestras a GENYCA se le notificará la recepción de la misma en la dirección de correo electrónico indicada en el Formulario de solicitud.